

VET SHIELD について



適用

“VET SHIELD”（ベツトシールド）は、手術後や、外傷性・非外傷性の角膜疾患の際、眼の慢性的な不快感の緩和、また角膜表皮の保護目的で主に使用されます。
直径および曲率半径 直径：14.0mm 曲率半径：9.0mm

使用制限

特に、感染症や眼科以外の他の病気を患っているもの、もしくは、角膜が混濁しているもの、更には下記の症状のでているペットに対しては、専門医の適切な指示を受けてご使用ください。

〈使用制限される疾病例〉

- ・ 急性の外郭角膜感染 ・ 角膜内感染症 ・ 眼瞼炎

保存

室温保存可能。 ※ 温度が40℃を越える場所や零下になる場所での保管は避けて下さい。

使用方法（概要）

- ①使用開始の少なくとも3分前には、シールド自体に涙液を含ませておきます。
- ②シールドを挿入する前に、必要があれば、点眼麻酔をかけます。
- ③眼球そのものを涙液で満たします。
- ④シールドは裏返しの状態になっておりますので、眼球の上で反転させます。（眼球と密着するようにして下さい）
- ⑤シールド全体に十分に涙液がいきわたるようにします。
- ⑥眼球全体がシールドで覆われます。

主原料はセルロースなので、約72時間で溶けてなくなります。（※個体差がございます）

梱包

6枚入り/1箱 [一枚毎に滅菌処理され、専用のプラスチックトレーにシールドされています]

注意 薬事法に基づき、使用は獣医師のみとなります。

輸入元:アローメディカル(株)
〒221-0865
横浜市神奈川区片倉 4-7-28
Tel:045(481)7471 Fax:045(481)7554