



FOR VETERINARIANS

ウェルチアレン社製
獣医用デジタルマクロビュー検耳鏡

Welch Allyn Digital MacroView™ Veterinary Otoscope

ウェルチアレン社製獣医用デジタルマクロビュー検耳鏡は
“診察して、説明して、そして保存する”という機能を持ち合わせた検耳鏡です。

獣医用デジタルマクロビュー検耳鏡は、コンピューターに接続して、耳道と鼓膜の鮮明な画像を観察、そして、その画像をデジタルデータとして保存が出来る検耳鏡です。
接続方法は簡単、操作もシンプルで使い易く、専用ソフトウェアも使用しませんので、3.5Vハンドルとコンピューターがあれば、すぐに使用出来ます。

獣医用デジタルマクロビューがあると…

- ・耳・口・歯等の画像を簡単にデジタルデータとして保存出来ます。
- ・耳・口・歯等の要観察部位の細かい部分を観察することが出来ます。
- ・今まで保存出来なかった耳・口・歯等の記録をカルテとともに保存すれば、詳細な記録を残すことが出来ます。
- ・鮮明な画像を介しての説明は、クライアントコンプライアンスを得るための最善の方法です。



※ハンドルは別売りです。
PCは別途ご用意下さい。

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™

ウェルチアレン社製

獣医用デジタルマクロビュー検耳鏡

The Welch Allyn Digital MacroView™ Veterinary Otoscope

USBケーブル1本で簡単接続
A-ミニBタイプを使用

ダイヤルを回して、
見たい部位に焦点を
合わせます。

130万画素の
イメージキャプチャーを内蔵

こちらのボタンで
撮影と画像反転
を行います。

ウェルチアレン社製3.5V仕様電源
ならば共用出来ます。

製品仕様

| | |
|----------|--------------------------------|
| 重さ | 95g |
| 寸法 | H:7.0cm L:10.2cm W:3.7cm |
| 定格 | ランプ 3.5V 810mA USB 5.0V 150mA |
| 防水 | 防水加工なし |
| 使用推奨環境 | |
| 対応OS | Windows XP SP2以降 |
| 推奨システム構成 | USB 2.0ポートがあり、 画像用モニターがあること |

操作は簡単! 直ぐに観察することが出来ます。

1 USBケーブルで 本体とPCを接続

本体側にA端子、マクロビュー側には
ミニB端子を接続すると、PCが本器を
「USBビデオ デバイス」として認識します。

スキャナとカメラ

USB ビデオ デバイス

デジタル カメラ

認識すると左図のように
マイコンピューターに
認識されます。

2 電源スイッチON

ハンドルのスイッチをONにします。
その際、スイッチは、光量が最大に
なるように回しきって下さい。

3 観察開始

後は、スペキュラ部を要観察部位に
差し入れて、観察して下さい。

デジタルマクロビュー

こんなに違う!?
～人間用と動物用～

| 型番 | 用途 | 焦点距離 |
|--------------------------|-----|-------------------|
| WA23960/獣医用デジタルマクロビュー検耳鏡 | 動物用 | 焦点距離: 30~150mm |
| WA23920/デジタルマクロビュー検耳鏡 | 人間用 | 焦点距離: 20~45mm |

WA23960獣医用デジタルマクロビュー検耳鏡は、犬の耳道に合わせた設計が成されており、人間の耳道の観察用に設計された人間用デジタルマクロビューよりも焦点距離が長く設定されております。上記の焦点距離は、スペキュラ未装着で本体先端からの距離になります。

製品番号

本体

23960

獣医用デジタルマクロビュー検耳鏡

内容：本体×1、USBケーブル：3m長×1、4mm/4mmショート/5mm/5mmショート/7mm処置用スペキュラ 各1)

アクセサリ

23942 獣医用マクロビュースペキュラセット

(4mm/4mmショート/5mm/5mmショート/7mm処置用スペキュラ 各1)

23834-S 4.0mmマクロビュー獣医用ショートスペキュラ

23835-S 5.0mmマクロビュー獣医用ショートスペキュラ

23834 4.0mmマクロビュー獣医用スペキュラ

23835 5.0mmマクロビュー獣医用スペキュラ

23837 7.0mmマクロビュー獣医用スペキュラ

23847 7.0mmマクロビュー獣医用処置用スペキュラ

06500-U マクロビュー用電球

71000-A ニッカド式充電ハンドル

71907 リチウムハンドルセット

<製造販売元>

アローメディカル 株式会社

〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-7-28
代表：TEL:045-481-7471

<製造元> ウェルチアレン社

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

一般医療機器：届出番号 第20-616号